

INSTRUCCIONES TOMA DE MUESTRAS EN CASA PRUEBA DE PATERNIDAD EN ADN. V02



ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

La **prueba de paternidad en casa**, se realiza mediante un kit de toma de muestras que le permite total discreción y facilidad en el procedimiento.

CONTENIDO DEL KIT:

- Dos (2) lancetas marca Accu-Chek. *Ver imagen 1. Estas lancetas no causan dolor en la punción.*
- Un par de guantes.
- Dos (2) motas de algodón.
- Dos (2) tarjetas FTA (papel de filtro) introducidas en un sobre de papel cada una.
- Dos (2) sobres pequeños de papel, uno marcado como **MUESTRA 1** y el otro como **MUESTRA 2**.

PROCEDIMIENTO:

TOME LAS MUESTRAS POR SEPARADO, PARA EVITAR CONFUSIONES Y MARQUE EL PAPEL (Tarjeta FTA) EN LA ZONA AMARILLA CON EL NOMBRE O PARENTESCO CORRESPONDIENTE.

La toma muestras se realiza por medio de punción en el dedo con lancetas.

1. Colóquese los guantes.
2. Se localiza el sitio a puncionar, se prefiere el dedo medio (corazón), ya que en el dedo índice puede quedar un dolor un poco molesto.
3. Se limpia con un algodón impregnado de alcohol (no suministrado).
4. La toma de muestras se realiza con lancetas (Ver imagen 1), que vienen listas para usar, sólo basta con retirar el capuchón de la punta, girando suavemente.
5. Después de retirado el capuchón, se procede a colocar la punta de la lanceta en el dedo medio del corazón y luego se presiona el botón amarillo hasta que suene un clic. (Ver imagen 1)
6. Luego presionar el dedo y recolectar la sangre, esparciéndola directamente en el papel FTA (o papel Whatman) (suministrado dentro de los sobres de papel). (Ver imagen 2 – PARTE BLANCA).
7. Después de tomada la muestra, la lanceta utilizada se puede descartar en la basura normal. No es necesario el uso de guardián de seguridad.
8. Al terminar la toma de muestra, se limpia con un algodón seco el sitio de punción para que se detenga la salida de sangre.
9. **DEJAR SECAR LAS TARJETAS CON LA MUESTRA DE SANGRE, mínimo por 1 hora a temperatura ambiente, luego guárdelo dentro del sobre de papel suministrado y marcado, según corresponda, CADA MUESTRA POR SEPARADO.**

Repita el procedimiento desde el paso 2, para la otra persona a la que se le va a tomar muestra.

ANTE CUALQUIER DUDA O INQUIETUD, COMUNÍQUESE CON NUESTROS ASESORES EXPERTOS.
DNA EN CASA EN UNA COMPAÑÍA ONLINE, NO ATENDEMOS PERSONALMENTE

1 de 2



350 215 5522 - 350 215 5523 - 350 215 5524 - 350 215 5525



dnaencasa@hotmail.com

OBSERVACION: Una vez usada la lanceta, es decir después de presionar el botón amarillo, ya QUEDA INUTILIZADA (No se puede volver a utilizar).

Imagen 1. Lanceta para punción en el dedo.

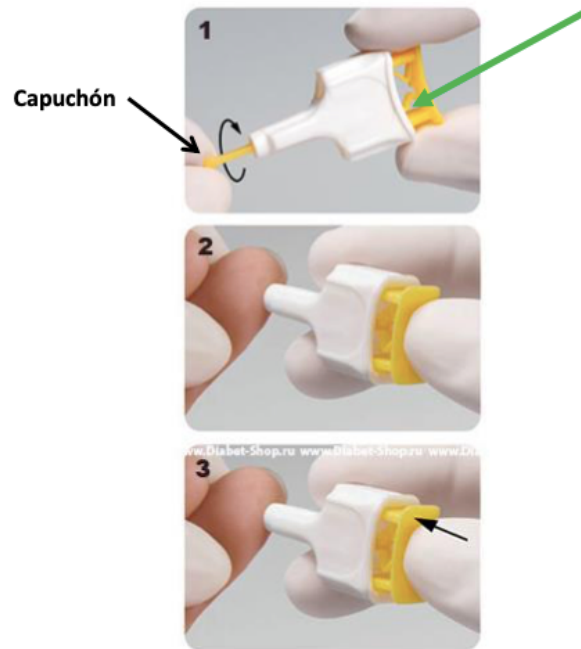


Imagen 2. Toma de muestras de sangre a partir de punción con lanceta.



Envíe las muestras POR SERVIENTREGA, PARA RECLAMAR EN OFICINA PRINCIPAL MEDELLÍN - ANTIOQUIA, a nombre de DNA en CASA, NIT 900887471-7.

ANTE CUALQUIER DUDA O INQUIETUD, COMUNÍQUESE CON NUESTROS ASESORES EXPERTOS.
DNA EN CASA EN UNA COMPAÑÍA ONLINE, NO ATENDEMOS PERSONALMENTE

2 de 2



350 215 5522 - 350 215 5523 - 350 215 5524 - 350 215 5525



dnaencasa@hotmail.com